



Bedienungsanleitung Einstellung CPM Motorschienen

am eingeschalteten Gerät (die angekreuzte Schiene ist diejenige, welche Sie benutzen)

Das Gerät darf nur bis zur Schmerzgrenze eingestellt werden.

□ Motorschiene ohne Fernbedienung


HM Medizintechnik
GMBH & CO. KG
VERKAUF ■ VERMIETUNG ■ SERVICE

1. Gerät mittels Handschalter anhalten,
2. gewünschte Parameter entsprechend der Vorgaben des Arztes im Behandlungsplan über
Knie -  - FLEXION - Beugung,  EXTENSION - Streckung, Drehregler maximal einen Strich weiter stellen,
Schulter / Elle - Schieberegler fest eindrücken und nach außen maximal einen Strich weiterschieben, (ggf. unteren Schieberegler festhalten)

Achtung! Extension / Streckung für Ellenbogenschiene nie unter 0 Grad einstellen!

3. mit Handschalter erneut starten.

□ Motorschiene mit Fernbedienung


1. Über  -Taste Gerät anhalten,

2. gewünschten Parameter der Knieschiene über jeweilige Taste anwählen,

3. Wert blinkt im Display der Fernbedienung,

4. blinkenden Wert mit   oder   einstellen,



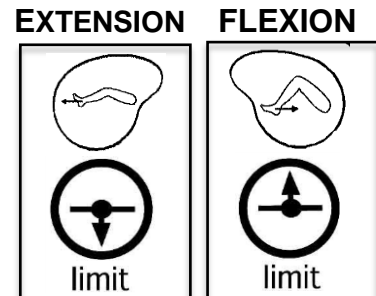





5. Start drücken, Wert wird gespeichert bzw. Wert blinkt 6x, dann speichert er sich selbst.







□ Kinetec - Geräte (Elle, Schulter)

1. Gerät mittels Handschalter anhalten,
 2. Kontermutter + Rändelmutter (befinden sich am Gewindestab entlang der Gradskala) der jeweiligen Bewegungsrichtung lösen und ca. 2-3 Umdrehungen nach außen weiter stellen,
 3. mit Handschalter erneut starten.
-

□ **Knie-Motorschiene FISIOTEK 3000 E (RIMEC)**

1. STOP drücken,
2. am Bedienfeld  drücken,
3. mit  oder  Taste - Streckung/ Extension 
 oder - Beugung/ Flexion 
 anwählen,
4. Wert jeweils mit  oder  Taste einstellen,
5.  drücken, auf dem Display erscheint „Stand by“.
6. Start drücken.

□ **Knie mit Fernbedienung K100 Jace**

1. Gerät über  -Taste anhalten,
2. Schiebeschalter auf „Programm“ schieben, 
3. gewünschte Taste  (Beugung) oder  (Streckung) auswählen,
4. mit  oder  gewünschten Wert einstellen,
5. Schiebeschalter auf „Lauf“ stellen, 
6. Start drücken. 

Bei Änderungen von Kraft/Pause muss erst die jeweilige Bewegungsrichtung vorgewählt werden (EXT / FLEX), dann erst die Kraft/Pause wählen und ändern.

Bei Fragen und Problemen wenden Sie sich bitte an Ihren Außendienstmitarbeiter (siehe Visitenkarte) oder gerne an uns Tel.: 0 97 71/ 68 81 00.