





Bedienungsanleitung









Schulter Motorschienen Centura Premium



Für den ABD-Modus (oranges Lämpchen an bei  Taste)

1.  Taste drücken,
2.  drücken, rechter Wert blinkt,
3. mit  - Taste rechten blinkenden Wert _____ ° höher stellen.
4.  -Taste drücken.

Für den ABD-Modus (oranges Lämpchen an bei  Taste)

1.  Taste drücken,
2.  - Taste drücken bis **ROT** in der Anzeige blinkt,
3.  drücken, rechter Wert blinkt, mit  - Taste ____ ° höher stellen,
4.  - Taste drücken bis **ABD** in der Anzeige blinkt,
5.  drücken, rechter Wert blinkt, mit  - Taste ____ ° höher stellen,
6.  -Taste drücken.

Blinkende Werte lassen sich mit der  auch niedriger stellen.

Bei Fragen und Problemen wenden Sie sich bitte an ihren Außenmitarbeiter (siehe Visitenkarte) oder gerne an uns unter Tel.: 0 97 71/ 68 81 00.